




Kurzanleitung für Orthopädietechniker

TASKA HandGen1, Gen2
Medium (7¼ Zoll) & Large (8¼ Zoll) V2.1

 **TASKA™**


1. Überprüfen

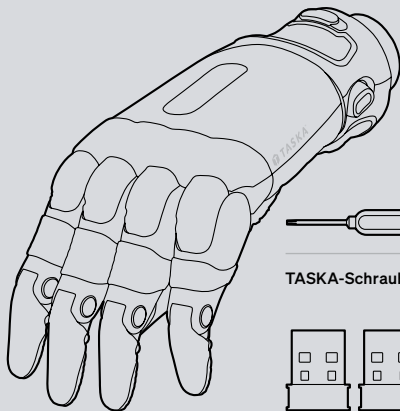


TASKA HandGen2*




2 x Handrückenabdeckungen

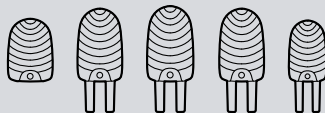

1 x Daumen und 4 x Fingergriffspitzen

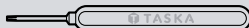


TASKA-Schraubenzieher

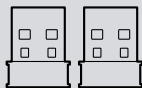


2 x Bluetooth-Adapter



TASKA-Akku

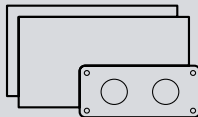

Laminierdummy-Blöcke

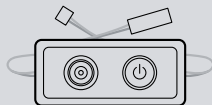


Betriebsschalter


 **TASKA™**

do more


* Abbildung zeigt ein Handgelenk mit Schnelltrennung.

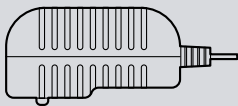

Netzladegerät

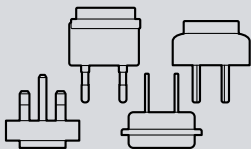


Universal-Steckersatz

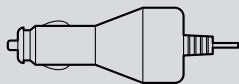


Kfz-Ladegerät


Nur für Handgelenk mit Niedrigprofil

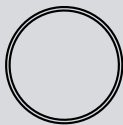


1 x O-Ring

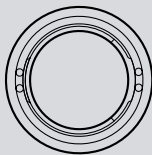

Laminierringe

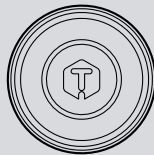

Schutzabdeckung

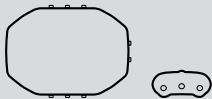

Schalterblöcke



Handgelenk-Schmiermittel



2 x Handgelenkstellschrauben

2. Herunterladen

Software Downloads


Sie finden alle Software-Download-Links für Orthopädietechniker und Benutzer unter:

taskaprosthetics.com/support

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen TASKA-Vertreter oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:

support@taskaprosthetics.com

Für Mobiltelefone steht außerdem eine kostenlose App zur Verfügung.

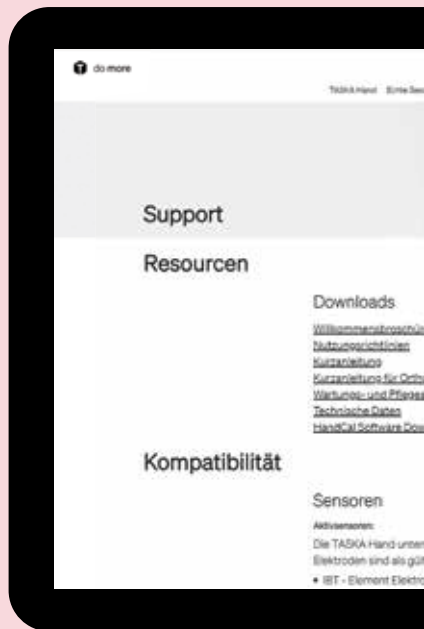

3. Steuern

Greifzyklus-Tasten

Weitere Informationen zu den Greifzyklus-Tasten finden Sie auf taskaprosthetics.com.

Akkuleuchte

Leuchte blinkt bei niedrigem Akkustand.

Störungsleuchte

Die Leuchte blinkt, wenn eine Störung vorliegt. Führen Sie einen Neustart der Hand durch.

Home-Taste

Auswahl der drei Hauptgriffe. Drücken zum Wechseln zwischen Universalgriff und Haltegriff. Halten für den Pinzettengriff.



EMG-Kontrollleuchte

Blinkt, wenn Signale („Muskelsignale“ oder „aller Sensoren“) begrenzt werden.

Bluetooth-Leuchte

Leuchtet auf, wenn Bluetooth aktiviert ist.

Leuchte der Hand-Taste

Leuchtet kurz auf, wenn Begrenzungsmodus eingeschaltet ist.

Hand-Taste

Rufen Sie nacheinander bis zu fünf Griffe Ihrer Wahl auf. Halten zum Ein- bzw. Ausschalten von Bluetooth.

EMG-Taste

Ändern Sie die Funktion dieser Taste mithilfe der Handcal-Software, um die „Muskelsignale“ oder Signale „aller Sensoren“ zu begrenzen. Halten zum Ein- bzw. Ausschalten des Tons.


4. Verbinden (TASKA HandGen1)

Verbinden der Hand

Sollte Ihre TASKA Hand mit einem Handgelenk mit Schnelltrennung (QD) ausgestattet sein, ist es einfach, die Hand zu verbinden und zu entfernen.

Um die Hand zu verbinden:

1. Richten Sie den Handgelenkanschluss der Hand mit dem Prothesenschaft aus.
2. Drücken Sie die zwei Teile zusammen. Sie hören ein Klicken, wenn die Hand in dem Prothesenschaft eingerastet ist.

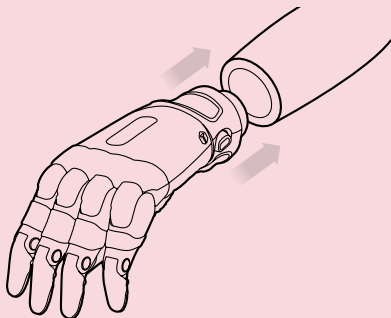

Verbinden des Handgelenkes mit Schnelltrennung (QD)

Um die Hand zu entfernen:

1. Drehen Sie Hand und Prothesenschaft in entgegengesetzte Richtungen und ziehen Sie die Hand vorsichtig von der Fassung weg.
2. Sobald die Drehbewegung den richtigen Punkt erreicht hat, löst sich die Hand aus dem Prothesenschaft.

Handgelenk mit Niedrigprofil

Bei allen TASKA Händen, die mit einem Handgelenk mit Niedrigprofil (LP) ausgestattet sind, beachten Sie bitte relevante Hinweise hierfür in dem Nutzungsrichtlinien.


4. Verbinden (TASKA HandGen2)

Verbinden der Hand


Sollte Ihre TASKA Hand mit einem Handgelenk mit Schnelltrennung ausgestattet sein, ist es einfach, die Hand zu verbinden und zu entfernen.

Verbinden der Hand:

1. Setzen Sie die Hand in die Aufnahme des Prothesenschafts.
2. Drehen Sie die Hand um 45° einwärts (Pronation), bis Sie einrastet.
3. Überprüfen sie die Verbindung, indem Sie die Hand in die andere Richtung drehen. Das Handgelenk sollte sich normal drehen (klicken) und sich sicher anfühlen.
4. Die Hand ist einsatzbereit.

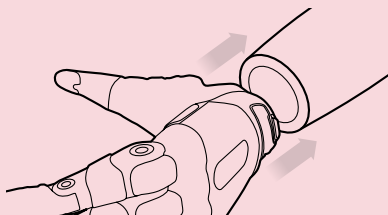

Setzen Sie die Hand in die Handgelenkaufnahme

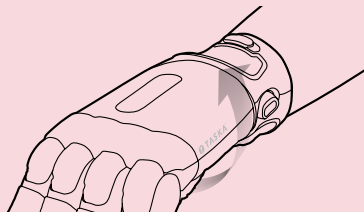

Drehen und Fixieren der TASKA-Hand




Verfügt die Hand über einen Dichtring, reinigen Sie diesen sowie die Dichtflächen der Handgelenkverbindung des Prothesenschafts mit einem weichen, feuchten Tuch, um vor dem Anschluss etwaige Verschmutzungen zu entfernen. Weitere Informationen zur Pflege des Handgelenks finden Sie in den Nutzungsrichtlinien.

Trennen der Hand

Entfernen der Hand:


1. Drücken und halten Sie die beiden Entriegelungstasten.
2. Drehen Sie die Hand währenddessen um 45° auswärts (Supination), bis Sie einen Widerstand spüren. Es handelt sich um eine glatte Drehung, ohne hörbare Klicks.
3. Entfernen Sie die Hand.

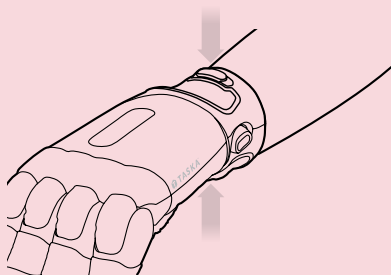

Drücken und halten Sie die beiden Entriegelungstasten

Handgelenk mit Niedrigprofil

Beachten Sie bei allen TASKA Händen, die mit einem Handgelenk mit Niedrigprofil ausgestattet sind, bitte die entsprechenden Hinweise in den Nutzungsrichtlinien.

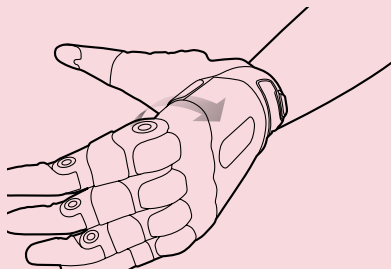

Drehen und Entfernen der TASKA-Hand


5. Ein- und Ausschalten

Ein- und Ausschalten der Hand

Eine Taste am Prothesenschaft dient zum Ein- und Ausschalten der TASKA-Hand.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Hand, dass Finger und Daumen sich ungestört vollständig öffnen können. So gewährleisten Sie beim Einschalten eine korrekte Einstellung der Positionssensoren.

Drücken Sie die Taste zum Einschalten einmal. Beim Einschalten der Hand blinken zwei der Leuchten auf dem Handrücken kurz auf und die Finger öffnen sich, sobald die Hand bereit ist.

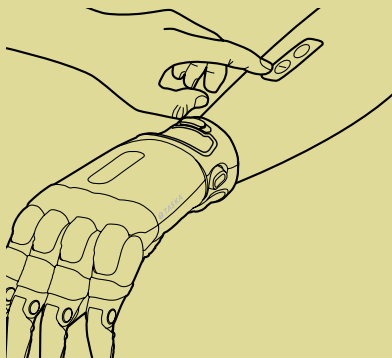

Ein- und Ausschalten der TASKA-Hand



Falls die TASKA Hand zusammen mit einem Ellenbogen oder einem anderen Stromsystem verwendet wird, halten Sie sich an die Informationen in der entsprechenden Bedienungsanleitung.


6. Aufladen

Laden der Akkus

Entfernen Sie die Hand und den Prothesenschaft vor dem Aufladen von Ihrem Stumpf. Der Ladepunkt ist eine Magnetbuchse neben der Einschalttaste.

Aufladen der Hand:


1. Legen Sie das magnetische Ende des Ladekabels oben auf die Ladebuchse. Diese richten sich automatisch aus.
2. Verbinden Sie das Netzladegerät mit einer Wandsteckdose bzw. das Kfz-Ladegerät mit einer Fahrzeugsteckdose (mit nicht mehr als 12 V). Während des Ladevorgangs wechselt die Leuchte des Ladegeräts auf rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die Leuchte auf grün.

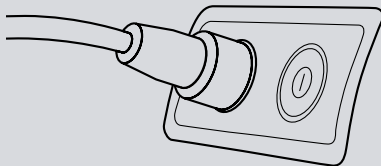

Verbinden des Ladekabels mit der magnetischen Ladebuchse am Netzschalter

! Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer TASKA-Akkus nur die von TASKA gelieferten Ladegeräte.

Dieser Leitfaden ist lediglich eine Kurzanleitung für den Schnellstart. Umfangreiche, detaillierte Anleitungen zur sicheren Verwendung der TASKA-Hand finden Sie in den **Nutzerrichtlinien.**

 TASKA Prosthetics, 10 Nelson Street,
Riccarton, Christchurch 8011, Neuseeland



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Den Haag
Niederlande