


Dichtring (in der Abbildung grau dargestellt)

 TASKA Prosthetics, 10 Nelson Street,  
Riccarton, Christchurch 8011, Neuseeland

   EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
Netherlands



# Nutzeranleitung

Dichtring & QDW Laminiermanschette V1.2

 **TASKA**<sup>TM</sup>

---

## Ein wasserdichtes Handgelenk mit Schnelltrennung

Wenn Sie eine TASKA HandGen2 mit einem Dichtring von TASKA nutzen, können Sie sowohl die Hand als auch das Handgelenk bis zur ersten Öffnung im Prothesenschaft in Wasser tauchen.

Weiterführende Informationen zu den Einsatzbeschränkungen Ihrer TASKA Hand finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanleitung.



TASKA Prosthetics ist nicht verantwortlich für die Wasserdichtheit des Prothesenschafts an dem Ihre TASKA Hand befestigt wird.

Weitere Informationen zur Wasserdichtheit des Prothesenschafts erhalten Sie bei Ihrem Orthopädietechniker.



---

## Handgelenkpflege

Wenn Sie eine TASKA HandGen2 nutzen, müssen Sie auf deren ordnungsgemäße Pflege zur Wahrung der Wasserdichtheit achten. Ihr Laminiermanschetten-Kit umfasst einen Dichtring auf Handseite und eine Dichtfläche auf der Laminiermanschette selbst (siehe nebenstehende Abbildung). Überprüfen Sie diese Bestandteile regelmäßig auf Beschädigungen wie Risse oder tiefe Kratzer, die die Dichtung beeinträchtigen könnten.

- ⚠️ Sollten Sie am Dichtring oder an der Dichtfläche der Handgelenkverbindung eine Beschädigung feststellen, ist der Anschluss möglicherweise nicht mehr wasserdicht. Tauchen Sie in diesem Fall Ihre Hand bitte nicht tiefer in Wasser als bis zu den Tasten des beweglichen Handgelenks und wenden Sie sich an Ihren Orthopädietechniker.

Reinigen Sie den Dichtring und die Dichtflächen der Laminiermanschette

do more

regelmäßig, indem Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.


- ⚠ Lässt die Elektronik Ihrer Hand oder die Laminiermanschette Anzeichen eingedrungener Feuchtigkeit erkennen, trocknen Sie diese gründlich, bevor Sie die Hand wieder anschließen. Wenden Sie sich bei regelmäßig auftretender Feuchtigkeit bitte an Ihren Orthopädietechniker.

Wenn Sie ein MC Dichtring Kit verwenden, beachten Sie bitte, dass dieses nur mit der MC Unterarm Endkappe kompatibel ist. Hinweise zur Pflege und Wartung der Dichtfläche dieses Bauteils entnehmen Sie bitte der entsprechenden Nutzeranleitung.

- ⚠ Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen (umfassende Informationen hierzu finden Sie im Garantiedokument).



- ⚠ Wenn ein schwerwiegendes Problem im Zusammenhang mit diesem Gerät auftritt, melden Sie dieses bitte TASKA Prosthetics und der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie leben.\*

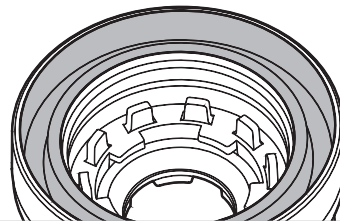

Dichtfläche auf der TASKA-Laminiermanschette (in der Abbildung grau dargestellt)

do more